

[会社情報](#)[製品情報](#)[知る・学ぶ](#)[カタログ・取扱説明書](#)[ショールーム](#)[お問い合わせ](#)[TOP](#) > [製品情報](#) > [在宅介護向け製品](#) > [リフティング \(重さを持ち上げるための用具\)](#) > [電動介護リフト](#) > [床走行式電動介護リフト](#) >[床走行式電動介護リフト KQ-781](#)

## ■ 床走行式電動介護リフト KQ-781

剛性が高く揺れの少ないアルミフレーム製。コードレス（充電式）で使いやすい電動介護リフトです。

- 安全使用荷重 205kg。剛性の高いアルミフレーム製
- 昇降時のハンガーのスイング量を軽減
- 抜止め付きハンガーフック
- ハンドルの高さや支柱の取付高が調節可能
- 低床ベッド対応、操作しやすいダブルキャスター

[この製品について問い合わせる](#)[この製品のカタログ・取扱説明書ダウンロード](#)

### 製品詳細

### オプション



サイズ	全幅65-106・全長130・全高131-205cm、質量約38kg
価格	¥405,000.【非課税】
TAISコード	00170-000695

[→ 機能](#) | [→ 動画](#)

### 機能

[閉じる](#)

#### 電源コードが邪魔にならないバッテリー駆動

充電式のバッテリー駆動なので操作中に足を電源コードに引っ掛ける心配がありません。バッテリーの残量がひとめでわかる液晶表示付きのバッテリーインジケーターが付いています。使用していないときに電源コードをコンセントに差すだけで自動的に充電されます。

※誤操作やバッテリーの消耗を防ぐために、使用しないときには緊急停止ボタンを押し込んでください。

#### 手元スイッチでブームのあげさが可能

手元スイッチを操作してブームのあげさがおこなえます。旧製品 (KQ-771) と比較して約10%速く昇降します。非常時にはコントロールボックスの緊急停止ボタンを押し込むと、すべての電源が遮断されブームを停止させることができます。緊急停止ボタンを矢印の方向に回すと解除できます。

※緊急時には手動または電動でブーム操作が可能です。アクチュエーターの先端にある緊急降下装置を時計方向に回すとブームを手動でさげることができます (あげることはできません)。コントロールボックスにある緊急あげボタンを押すと電動でブームをあげることができ、緊急さげボタンを押すと電動でブームをさげることができます (ボタン操作は先の細いものでおこなってください)。



### 昇降時の揺れとスイング量を軽減

安全使用荷重205kg。支柱とブームは剛性が高く揺れが少ないアルミ製です。ハンガーとブームのリンクを工夫することで昇降時のスイング量を軽減しています。

【ビデオ】 KQ-781 昇降時のハンガーのスイング量 (01:11)

### 広いハンガー昇降範囲

ハンガーの昇降範囲が広いので、低くするとゆかからの吊りあげが可能です。また、高くするとウォーキングベストを装着して立位・歩行をサポートできます。ハンガーフックの昇降範囲は、支柱を一番高く取付けた場合で61-184cm、支柱を真ん中に取り付けた場合で56-179cm、支柱を一番低く取付けた場合で51-174cmです。




### 抜止め付きハンガーフック

ハンガーフックにはスリングシートが不意に抜けないように、抜止めが付いています。



### 用途に合わせてハンドルの高さや支柱の取付高の調節が可能

ハンドルの取付け位置は6cmおきに5段階設けてあるので、操作する方の使いやすい高さに調節できます。また、支柱の取付け穴を5cmおきに3段階設けてあるので、用途に合った高さに調節できます。

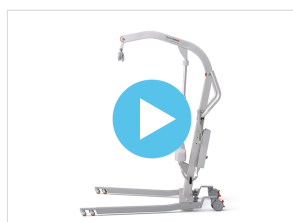


### 低床ベッド対応、操作しやすいダブルキャスター

脚先端の高さは6.6cm。低床ベッドに対応します。操作しやすいように、前輪は左右それぞれに二輪が付いたダブルキャスター仕様です。  
※ベッドのハイローリンクと干渉する場合があります。ベッドを操作するときには、リフトをベッドから外してください。



### 脚の開閉がしやすい大型の脚開閉ペダル

使用するときには、脚開閉ペダルの右を踏み込み脚を開きます。左側を踏み込むと脚は閉じます。操作しやすいように大型のペダルが付いています。

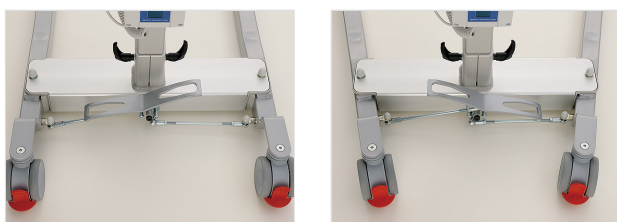

### 安全にお使いいただくために、定期点検をお知らせ

定期点検をお知らせする「SERVICE」マークが、コントロールボックスの液晶画面に1年に1回表示されます。安全にお使いいただくために1年に1回は定期的に点検してください。また、前回の定期点検から経過した日数を表示することも可能です。

動画

詳細 

## 製品をご検討中のお客様へ

インターネット資料請求・ご相談

お問い合わせ



会社情報	製品情報	知る・学ぶ	カタログ・取扱説明書	ショールーム	お問い合わせ
会社概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>医療施設向け製品</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>転倒転落対策</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>カタログ・取扱説明書ダウンロード</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本社ショールーム</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>総合お問い合わせ</li> </ul>
沿革	<ul style="list-style-type: none"> <li>製品コード一覧</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>褥瘡対策</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>札幌ショールーム</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>部品・アフターサポートに関するお問い合わせ</li> </ul>
事業案内	<ul style="list-style-type: none"> <li>旧製品コード一覧</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>早期離床の促進</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>マニュアル・動画ダウンロード</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>仙台ショールーム</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>よくあるご質問</li> </ul>
事業所一覧		<ul style="list-style-type: none"> <li>感染対策</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>さいたまショールーム</li> </ul>	
テクノロジー&ヒストリー	<ul style="list-style-type: none"> <li>高齢者施設向け製品</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>業務負担軽減</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>横浜ショールーム</li> </ul>	お知らせ
5つの安心	<ul style="list-style-type: none"> <li>製品コード一覧</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>認知症ケア</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>名古屋ショールーム</li> </ul>	製品に関する重要なお知らせ
CSR情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>旧製品コード一覧</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>インテリアプランニング</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>大阪ショールーム</li> </ul>	イベント情報
投資家向け情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>在宅介護向け製品</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>クリティカルケア</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>高松ショールーム</li> </ul>	国内グループ会社
採用情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>製品コード一覧</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>周産期・小児・新生児医療</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>広島ショールーム</li> </ul>	パラマウントベッドホールディングス
CMギャラリー	<ul style="list-style-type: none"> <li>旧製品コード一覧</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>医療・介護トピックス</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>福岡ショールーム</li> </ul>	バラテクノ
受賞歴		<ul style="list-style-type: none"> <li>介護の基礎知識</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>京橋ショールーム</li> </ul>	パラマウントケアサービス
アスリート支援活動	<ul style="list-style-type: none"> <li>睡眠と健康に関する製品</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>メディカル・デザイン・スタジオ 東京</li> <li>メディカル・デザイン・スタジオ 大阪</li> <li>パラマウントベッド 眠りギャラリー TOKYO</li> <li>パラマウントベッド 眠りギャラリー SAPPORO</li> <li>パラマウントベッド 眠りギャラリー NAGOYA</li> <li>パラマウントベッド 眠りギャラリー OSAKA</li> <li>パラマウントベッド 眠りギャラリー FUKUOKA</li> </ul>	サダシゲ特殊合板株式会社 NTT PARAVITA株式会社 海外グループ会社

